

SpermCheck Fertility

使用說明書

SpermCheck Fertility 是一個家用快速檢測精子濃度工具，它能簡單快捷地讓你知道精子數量是否在正常水平。

SpermCheck Fertility 是一個快速的篩查測試，能告訴你一個正或負的結果。測試結果會在“結果解釋”一節中詳細說明。無論你的測試結果是怎樣，在諮詢醫生之前，完全了解測試的意義是非常重要的。請務必按照指示操作使用。

重要信息

- 外用測試
- 請存放於乾燥的地攝氏 2 度— 30 度。不要冷藏及避免陽光直射。
- 測試開始前請仔細閱讀本說明書
- 在使用日期前使用
- 請存放於兒童接觸不到的地方。
- 不要使用此測試作為控制生育的方法。
- 此測試不能防止性病。
- 此測試不能用作親子鑑定。
- 視力不良或不當的照明可能會影響結果的闡釋。
- 此測試只能使用一次，不要重複使用。
- 此測試僅評估精子濃度，它不能檢測所有生育問題

說明與使用，

1. 為了獲得準確的結果，請務必按照每個步驟操作。
2. 閱讀並理解整個使用小冊子。
3. 檢查包裝內容。
4. 於上次射精後第 2 至 7 天收集精液樣本。
5. 執行測試。
6. 閱讀結果。
7. 如不能了解測試的結果，敬請向家庭醫生查詢

包裝組件內容

SpermCheck Fertility 包含以下組件：

1. SpermCheck 精子測試盒（在密封袋內）
2. 精液傳輸吸管（在密封袋內）
3. 精液收集杯
4. SpermCheck® 溶液瓶

如何收集樣本


- 樣本收集應在上次射精後的 2 到 7 天內進行。
- 請採用手淫方式收集樣本及確保精液完全收集。
- 不要使用任何潤滑劑或乳液，因為這可能會干擾測試結果。
- 不要使用避孕套收集樣品。
- 務必收集全部的精液，如在過程中失去部份精液，請丟棄餘下的樣本並用自來水沖洗收集杯，讓它風乾後再使用。不要使用肥皂或洗滌劑清洗。
- 樣本收集後，讓杯子平放在桌面上。
- 測試應在樣本收集後 3 小時內完成
- 當你準備測試時，請按照下一節“如何進行測試”的指示進行

如何進行測試


1. 將所有的測試組件平放在桌上，並在開始測試之前，準備一隻手錶或計時器。
測試前讓精液等待至少二十分鐘。
於射精後因精液太厚，所以必須等待至少 20 分鐘讓精液變薄（液化）。



2. 打開密封袋取出精液傳輸吸管，並用它輕輕攪拌杯中的精液樣本約 10 次，直致完全混合。
3. 用手指將包裝盒一面的穿孔線打開，這將成為 SpermCheck 溶液瓶的支架。擰開溶液瓶的蓋子並把瓶身直立於新建的支架上。

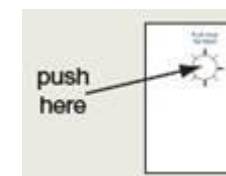

4. 慢慢地拉動吸管的活塞並抽取精液樣本至黑色刻度。抽取時避免氣泡存在，如發現，請完全退出樣本再從新抽取。請確保精液不多不少的填滿到黑色刻度位置

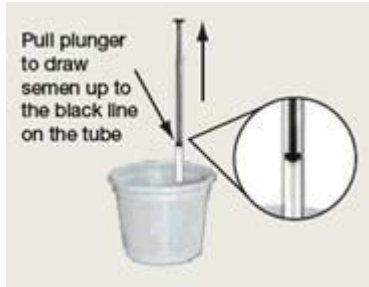


5. 將吸管内所有精液樣本注射入 SpermCheck 溶液瓶內。



6. 扭緊溶液瓶的蓋子並上下搖動約五至十次讓瓶內的液體適當地混和。如果精液仍然顯得很稠，請多重覆十次。

**搖晃時請不要過度用力免得液體起泡

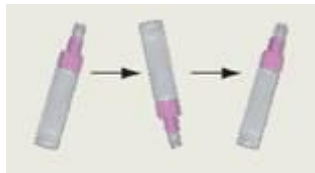

7. 進行下一個步驟（步驟 8）之前，請讓裝有精液混合物的 SpermCheck 溶液瓶靜置 2 分鐘。

8. 將裝有精子檢測盒的鋁箔袋打開，取出檢測盒並正面朝上放在一個平坦的地方。扭開 SpermCheck 溶液瓶的蓋子。



9. 握住 SpermCheck 溶液瓶並輕輕地擠壓出 6 滴精液混合物在測試盒的樣本窗上 (S)。樣本窗是一個標記有 (S) 的圓形開口。不要添加多於或小於 6 滴精液混合物到檢測盒。



10. 開始計時 7 分鐘



11. 7 分鐘後讀取結果。等待時間不要太早或超過 7 分鐘，因為這可能會產生不正確的結果。

結果解釋

在充足光線下，首先觀察控制區(C)的控制線，如測試正確，您會看見一條紅色線。如看不見紅色的控制線即表示這次測試不正確及結果無效。

接下來，觀看結果。如果你看到一條紅色線在測試區(T)出現，這表示精子數量每毫升不少於 2 千萬個(正)。如果你沒有看到紅色線，這表示精子數量每毫升少於 2 千萬個(負)，建議你向醫生諮詢。正常男仕通常每毫升有 2 千萬個精子或以上。

重要事項：在閱讀測試結果時，只需確定在控制區(C)和測試區(T) 是否有線出現。而不需互相對比，它們之間沒有強、弱之分。測試線可能會或不會比控制線深色。

